

## Immundiagnose der Tuberkulose - QuantiFERON-TB-Gold *In-Tube*



Röhrchen etikettieren

**Blutentnahme**

Wichtig **alle drei Röhrchen füllen**  
bis zur Füllhöhe-Markierung = 1 ml, nach  
Füllung jedes Röhrchen noch 3 sec an Nadel  
belassen

**Falls Butterfly**

erst Schlauch mit Vacutainer-Röhrchen  
füllen, dann Quantiferon-Röhrchen aufset-  
zen

Röhrchen 5 sec kräftig schütteln



Röhrchen nicht in Kühlschrank oder Gefrierfach

Alternative wählen



**Rascher Transport ins  
ZLM**  
bei 17-27°C  
nach Blutentnahme muss  
innert  
16 Stunden **im ZLM** inkubiert werden

Option für auswärtige Einsender per **Swiss Kurier Intercity**. Probe wird durch Kurier abgeholt. Anmeldung mit Vorteil bereits am Vortag, jedoch spätestens bis 09.00 h des Versandtages unter Tel. 0800 888 888. Zustellung im ZLM garantiert bis 17.00 h. Auf Kosten des Auftraggebers!

**Annahme ZLM**  
Montag – Donnerstag 08:00 – 17:30 Uhr

**Inkubation vor Ort**  
im Wärmeschrank  
37°C:  
- Röhrchen vorher noch-  
mal kräftig mischen  
- Röhrchen stehend,  
Kappe oben  
- Dauer 16-24 Stunden



**Transport ins ZLM**  
- innert 72 h  
- Umgebungstemperatur 2°- 27°C

Option für längere Transportzeiten:  
10 min. Zentrifugation bei 1'500 – 2'200 g  
nach 37°C Inkubation. Dadurch Haltbarkeit der Probe 8  
Wochen bei 2-8°C

**Annahme ZLM**  
Montag – Freitag 08:00 – 17:30 Uhr  
Samstag 08:00 – 11.30 Uhr

**Befundmitteilung : 2 x wöchentlich, häufiger bei hohem Probenaufkommen**

**Abrechnung:** 100 Taxpunkte (EAL 01 Jan 2011; 3453.00)