

## Immunodiagnostic de la tuberculose - QuantiFERON-TB-Gold *In-Tube*



Etiquiez le tube



Ne pas attacher  
l'étiquette  
sur la marque

Prise de sang

Important: **Remplissez tous les 3 tubes** jusqu'aux marques = 1 ml, après le remplissage laissez chaque tube pendant 3 secondes à l'aiguille

**Avec Butterfly**

remplissez d'abord le tuyau avec le vacutainer-tubes et posez ensuite le tube de QuantiFERON

Secouez le tube vivement pendant 5 sec



Ne pas mettre le tube dans le réfrigérateur ou dans le congélateur

choisissez une alternative



**Transport vite à ZLM**  
à 17-27°C  
après la prise de sang.  
l'échantillon doit être incubé  
dans ZLM en 16h

Option pour expéditeur externes par **Swiss Courier Intercity**. L'échantillon est pris par le Courrier. Annonce si possible la veille ou jusqu'à 09.00 h au plus tard sous le no de tel. 0800 888 888. remise à ZLM garantie avant 17.00 h. Coûts au débit du mandant!

**Réception ZLM**

Lundi – Jeudi 08:00 – 17:30 Uhr

**Incubation à l'endroit**  
dans l'incubateur à  
37°C:

- auparavant secouez le tube vivement
- tube debout, couverture en haut
- durée 16-24 h



**Transport à ZLM**

- en 72 h
  - temp. d'environnement 2°- 27°C
- Option pour temps de transport plus longs:  
Centrifugation 10 min. à 1'500 – 2'200 g  
après incubation à 37°C. Solidité 8 Semaines à 2-8°C

**Réception ZLM**

Lundi – Vendredi 08:00 – 17:30 Uhr  
Samedi 08:00 – 11.30 Uhr

**Transmission des résultats : 2 x par semaine, plus souvent lors de haute fréquence de demandes**

**Facturation:** 100 points taxe (EAL 01 Jan 2011; 3453.00)